



COVERPLAST AG


Hufleder kitt ZR

- **Verhindert Stollenbildung im Schnee**
- **Haftet hervorragend auf der Hufsohle**
- **Verhindert Hufquetschungen**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Kann mehrmals verwendet werden**



COVERPLAST AG
 Unionstrasse 14, Postfach CH-9403 Goldach Tel. 071 841 68 64 Fax 071 841 70 75

Hufleder kitt ZR
 1. Das Pferd auf saubere, harte Unterlage stellen (kein Naturboden)
 2. Reinigen und Auskratzen des Hufes, besonders des Spaltes zwischen Huf und Eisen.
 3. **Hufleder kitt ZR** ca. 5 Minuten in warmem Wasser (ca. 75°C) einweichen, herausnehmen und kneten bis er weich und etwas klebrig ist.
 4. Dann die Masse mit feuchten Händen auf der Hufsohle verteilen. Es ist besonders darauf zu achten, dass der **Hufleder kitt ZR** gut unter die Trachten des Hufeisens gedrückt wird.
 5. Bis zum vollständigen Erkalten von **Hufleder kitt ZR** ist das Pferd stehen zu lassen (ungefähr 15 bis 20 Minuten).

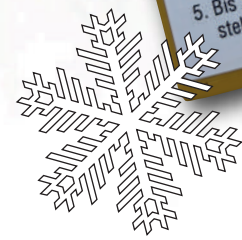

COVERPLAST AG

Hufleder kitt ZR



1
 Für die Arbeiten mit **Hufleder kitt ZR** soll das Pferd auf einem gereinigten und harten Boden stehen (kein Naturboden).
 Nach Reinigung des Hufes und Auskratzen des Spaltes zwischen Eisen und Huf wird der Hufleder kitt in ca. 70 - 75° warmem Wasser 3 - 5 Minuten eingeweicht, sodass eine weiche, kaugummiähnliche Masse entsteht (bei zu heissem Wasser wird der **Hufleder kitt ZR** klebrig). Diese Masse gut durchkneten.
 Pro Huf wird ungefähr 1 Tafel (d.h. ca. 120-150 gr) **Hufleder kitt ZR** benötigt.



2
 Die weiche Masse wird (eventuell mit feuchten oder eingefetteten Händen) auf die Hufsohle, unter das Eisen und speziell unter die Trachten des Eisens gedrückt.
 Um eine optimale Haltbarkeit des Hufleder kittes zu erzielen, ist es wichtig, dass der Hufbeschlag verstärkt abgedacht ist und die Gebrauchsanweisung **genau** befolgt wird (**Wartezeit nach dem Einbringen unbedingt einhalten**).



3
 Das Pferd muss nach Beendigung der Arbeit stehen bis der **Hufleder kitt ZR** erkaltet ist (ca. 20 Minuten).
Hufleder kitt ZR kann während einer ganzen Beschlagsperiode auf der Hufsohle belassen werden. Wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben, kann **Hufleder kitt ZR** problemlos mit dem Hufkratzer entfernt werden, um ihn bei Bedarf erneut zu verwenden, (d.h. **wieder erwärmen - kneten und einbringen**).

COVERPLAST AG
 Unionstrasse 14, Postfach CH-9403 Goldach Tel. 071 841 68 64 Fax 071 841 70 75

Hufleder kitt ZR
 1. Das Pferd auf saubere, harte Unterlage stellen (kein Naturboden)
 2. Reinigen und Auskratzen des Hufes, besonders des Spaltes zwischen Huf und Eisen.
 3. **Hufleder kitt ZR** ca. 5 Minuten in warmem Wasser (ca. 75°C) einweichen, herausnehmen und kneten bis er weich und etwas klebrig ist.
 4. Dann die Masse mit feuchten Händen auf der Hufsohle verteilen. Es ist besonders darauf zu achten, dass der **Hufleder kitt ZR** gut unter die Trachten des Hufeisens gedrückt wird.
 5. Bis zum vollständigen Erkalten von **Hufleder kitt ZR** ist das Pferd stehen zu lassen (ungefähr 15 bis 20 Minuten).

